

DIE ALKOHOLISCHE SCHNELL- DESINFEKTION ALS SCHAUM-SPRAY

Incidin™ Foam

Gebrauchsfertiges Schaum-Spray
zur alkoholischen Schnelldesinfektion

PRAXISNAH NACH
EN 16615
GETESTET

**Breites Wirkspektrum gegen
Bakterien (inkl. TB) und Hefen.**

Hohe Desinfektionsleistung auf allen
alkoholbeständigen Flächen, geeignet in
Risikobereichen (z. B. im Tuchspender).

- ▶ Keine Aerosolbildung
- ▶ Exzellente Schaumbildung
- ▶ Angenehmer Geruch



Incidin™ Foam













Gebrauchsfertiges Schaum-Spray zur alkoholischen Schnelldesinfektion

| Unsere Leistung | Ihr Nutzen |
|---|---|
| Durch Schaumapplikation keine Vernebelung von Wirkstoffen, niedriger Alkoholgehalt | Angenehmes Arbeiten für den Anwender, ohne Gefahr des Einatmens von Aerosolen |
| Gebrauchsfertige Spraylösung mit besonders kurzer Einwirkzeit und angenehmen Geruch | Schnelldesinfektion und Reinigung in Kombination mit leistungsstarker und gezielter Anwendung, dabei besonders anwenderfreundlich |
| Anwendung im Incidin™ Dry Wipes System | Schnelle Anwendung am „Point of Care“ mit einer Standzeit von 28 Tagen und hochwertigen Tüchern in Premium-Qualität. |

| WIRKSAMKEIT | KONZENTRATION | EINWIRKZEIT |
|--|---------------|-------------|
| Flächendesinfektion gem. VAH-Verfahren 2015 (einschl. EN 16615), hohe Belastung | | |
| Bakterizid, levurozid | konzentriert | 5 Min. |
| Prüfung nach DVV / RKI-Leitlinie | | |
| Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV) gemäß RKI-Empfehlung 1/2004* | konzentriert | 0,5 Min. |
| Rotavirus* | konzentriert | 5 Min. |
| Papovavirus / Polyomavirus / SV40* | konzentriert | 15 Min. |
| EURO-Normen 4-Felder-Test (geringe und hohe Belastung) | | |
| EN 13727 (bakterizid) | konzentriert | 30 Sek. |
| EN 13624 (levurozid) | konzentriert | 30 Sek. |
| EN 14348 (tuberkulozid) | konzentriert | 3 Min. |
| EN 16615 (bakterizid, levurozid) | konzentriert | 5 Min. |

* DVV 2015 (Susp. Test)

GEBRAUCHSANWEISUNG

| | | | |
|--|---|---|---|
|  |  |  | <ol style="list-style-type: none"> 1 Auf die Oberfläche sprühen 2 Mit einem Tuch über die Oberfläche wischen und sicherstellen, dass diese ausreichend benetzt ist 3 Trocknen lassen |
|  |  |  | <ol style="list-style-type: none"> 1 Auf einen sauberes Tuch sprühen 2 Über die Oberfläche wischen und sicherstellen, dass diese ausreichend benetzt ist 3 Trocknen lassen |
|  |  |  | <ol style="list-style-type: none"> 1 Auf die Oberfläche sprühen und sicherstellen, dass diese ausreichend benetzt ist 2 Trocknen lassen |
|  |  |  | <ol style="list-style-type: none"> 1 Tuch aus dem Tuchspender entnehmen 2 Über die Oberfläche wischen und sicherstellen, dass diese ausreichend benetzt ist 3 Trocknen lassen |

EUROPEAN HEADQUARTERS:
ECOLAB EUROPE GMBH
 Richtistrasse 7
 8304 Wallisellen
 Switserland
 +41(0) 44-877-2001
 www.ecolab.eu



ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
 Ecolab-Allee 1
 40789 Monheim am Rhein
 +49(0) 2173-599-1900
 www.ecolabhealthcare.de



STARK.
 SCHNELL.
 EINFACH.



Oberflächendesinfektion für Medizinprodukte



Schnelldesinfektion für alkoholbeständige Flächen aller Art.
 ⓓ BIOZID N-12164

GEBRAUCHSANWEISUNG

Gebrauchsfertige Lösung zum Sprühen und Einschäumen, sowie zur Verwendung im Tuchspender (Incidin™ Dry Wipes System). Produkt auf trockenen Zellstoff geben, die Oberfläche abwischen und antrocknen lassen oder Oberfläche aus ca. 30 cm Entfernung einsprühen (ca. 40 ml / m²) und antrocknen lassen. Getränktes Tuch aus Tuchspender (Incidin™ Dry Wipes System) entnehmen und die Oberfläche abwischen. Dabei auf gleichmäßige Benetzung achten. Soweit elektrische Geräte betrieben werden, ist auf Explosionsschutz oder spannungsfreien Zustand der Geräte zu achten. Laut UVV sind Schutzhandschuhe zu tragen.

ZUSAMMENSETZUNG

In 100 g sind als Wirkstoffe enthalten:
 20 g 2-Propanol, 10 g Ethanol,
 0,2 g Benzalkoniumchlorid,
 0,01 g Glucoprotamin™

GUTACHTEN

Umfangreich geprüft - mikrobiologisch, virologisch, toxikologisch und ökologisch.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere aktuellen Gutachten zur Verfügung.

BESTELLINFORMATIONEN

| Produkt | Verpackungseinheit | Artikelnummer |
|---|--------------------|------------------------------|
| Incidin™ Foam Flasche | 16 x 750 ml | 30 460 10 PZN 045 242 66 |
| Incidin™ Foam Kanister | 2 x 5 L | 30 134 20 PZN 009 852 37 |
| Incidin™ Wipes Dispenser N Tuchspender | 1 Stück im Karton | 100 33 125 PZN 109 46 586 |
| Incidin™ Premium Wipes HygPack Deckel rot | 6 Stück / Karton | 100 32 690 PZN 109 46 511 |

LAGERUNG

Produkt in der Originalverpackung nicht über 25 °C lagern. Kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Haltbarkeit nach dem Öffnen:

Bis zum aufgedrucktem Verfalldatum

BIOZID- UND MEDIZINPRODUKTE VORSICHTIG VERWENDEN. VOR GEBRAUCH STETS ETIKETT UND PRODUKTINFORMATIONEN LESEN. NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.

