

Desinfektionstücher

# CLEANISEPT® WIPES FORTE MAXI

## Alkoholfreie Tücher zur Schnelldesinfektion

- Universelle, komfortable und zeitsparende Anwendung
- Umfangreiche, schnelle Wirksamkeit
- Besonders geeignet zur Desinfektion von mittelgroßen Flächen in Bereichen mit erhöhter Wirksamkeitsanforderung



### Produktbeschreibung

CLEANISEPT WIPES FORTE MAXI sind alkoholfreie, gebrauchsfertige Desinfektionstücher zur viruziden Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art in Bereichen mit erhöhter Wirksamkeitsanforderung.

CLEANISEPT WIPES FORTE MAXI bieten bei der Desinfektion und Reinigung von mittelgroßen Flächen eine universelle und zeitsparende Anwendung. Die Tücher lassen sich einzeln aus der praktischen Packung mit wiederverschließbarem Deckel entnehmen.

### Anwendungsgebiete

**Gemäß Medizinproduktegesetz (MPG):** Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichen, nicht invasiven Medizinprodukten, sowie Ultraschallsonden für transvaginale und abdominale Untersuchungen.

**Gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR):** Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichem, medizinischen Inventar und Flächen aller Art, insbesondere in Bereichen mit erhöhten Wirksamkeitsanforderungen.

| Wirkungsspektrum und Einwirkzeit                                     |   |   | 2 min |
|--|---|---|-------|
| <b>Bakterien und Hefen</b>   |   |   |       |
| Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion: Bakterizid, levurozid* | VAH** / EN 16615                        | mit Mechanik, hohe Belastung                                  | ●     |
| sporizid (Clostridium difficile)                                     | EN 13704                                |   | ●     |
| <b>Viren</b>   |   |   |       |
| viruzid  | RKI/DVV                                 | inkl. Polio-, Adeno-, Noroviren und SV40 /Papova/Polyomaviren | ●     |
| viruzid  | EN 14476/ prEN 16777                    | niedrige Belastung  | ●     |
| wirksam gegen Polyomaviren   | 4-Felder-Test / praxisnaher Carriertest |   | ●     |

\*einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)  
\*\*gelistet in der 5 Min.-Spalte der VAH-Liste

### Anwendung

Flächen mit CLEANISEPT WIPES FORTE MAXI bis zur vollständigen Benetzung abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.

Zur Aufbereitung von Ultraschallsonden für transvaginale und abdominale Untersuchungen gilt nachfolgende Arbeitsanleitung:

Vorreinigung: Nach Entfernen der Schutzhülle wischen Sie über die Sonde mit einem zuvor mit Wasser befeuchteten, handelsüblichen, keimarmen und fusselfreien Einmal-Handtuch, indem Sie es in der Handfläche einschließen und 5 Mal mit ein wenig Druck gleichmäßig über die Fläche der Sonde reiben. Achten Sie auf vollständige Benetzung der Fläche. Anschließend trocknen Sie die Sonde mit einem weiteren Einmal-Handtuch. Entsorgen Sie das Tuch.



## CLEANISEPT® WIPES FORTE MAXI

Alkoholfreie Tücher zur Schnelldesinfektion

**Reinigung:** Entnehmen Sie ein Tuch CLEANISEPT WIPES FORTE aus der Verpackung und falten Sie es in eine offene Handfläche aus. Reinigen Sie die Fläche inklusive Griffstück mit dem Tuch, indem Sie es mit der Handfläche einschließen und 5 Mal mit ein wenig Druck gleichmäßig über die Fläche reiben. Anschließend trocknen Sie die Sonde mit einem weiteren Einmal-Handtuch. Entsorgen Sie das Tuch.

**Desinfektion:** Entnehmen Sie ein zweites Tuch CLEANISEPT WIPES FORTE aus der Verpackung und falten Sie es in eine offene Handfläche aus. Desinfizieren Sie die Fläche inklusive Griffstück mit dem Tuch, indem Sie es mit der Handfläche einschließen und 5 Mal mit ein wenig Druck gleichmäßig über die Oberfläche reiben. Achten Sie auf vollständige Benetzung der Fläche und lassen Sie die Desinfektionsflüssigkeit über die gesamte Einwirkzeit von 2 Minuten abtrocknen. Entsorgen Sie das Tuch.

### Anwendungshinweise

Haltbarkeit nach Anbruch der Packung: 28 Tage.

### Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten:

0,4 g Alkyl(C12-6)dimethylbenzylammoniumchlorid,

0,2 g Didecyldimethylammoniumchlorid

### Materialverträglichkeit

Freigegeben für die Anwendung mit Ultraschallköpfen folgender Hersteller:

- Esaote GmbH, Köln
- Siemens Medical Solutions, Erlangen

### Gutachten

Unsere Produkte sind vollumfänglich begutachtet. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.


### Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung.

| Produkt                     | Gebinde    | VE | Inhalt    | Größe      | Art. Nr.    | PZN      |
|-----------------------------|------------|----|-----------|------------|-------------|----------|
| CLEANISEPT WIPES FORTE MAXI | Packung    | 96 | 10 Tücher | 20 x 22 cm | 00-235-T010 | -        |
|                             | Packung    | 12 | 80 Tücher | 20 x 22 cm | 00-235-T080 | 12774563 |
| Zubehör                     | Wandhalter | -  | 1         | -          | 00-902-FPH  | -        |

CE 0482

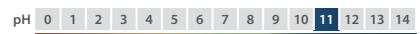

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH. [www.schumacher-online.com](http://www.schumacher-online.com)

