

# DIE ALKOHOLISCHE SCHNELL- DESINFEKTION ALS SCHAUM-SPRAY

## Incidin® Foam

Gebrauchsfertiges Schaum-Spray  
zur alkoholischen Schnelldesinfektion

PRAXISNAH NACH  
**EN 16615**  
GETESTET

**Breites Wirkspektrum gegen  
Bakterien (inkl. TB) und Hefen.**

Hohe Desinfektionsleistung auf allen  
alkoholbeständigen Flächen, geeignet in  
Risikobereichen (z. B. im Tuchspender).

- ▶ Keine Aerosolbildung
- ▶ Exzellente Schaumbildung
- ▶ Angenehmer Geruch



# Incidin® Foam










Gebrauchsfertiges Schaum-Spray zur alkoholischen Schnelldesinfektion

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Durch Schaumapplikation keine Vernebelung von Wirkstoffen, niedriger Alkoholgehalt	Angenehmes Arbeiten für den Anwender, ohne Gefahr des Einatmens von Aerosolen
Gebrauchsfertige Spraylösung mit besonders kurzer Einwirkzeit und angenehmen Geruch	Schnelldesinfektion und Reinigung in Kombination mit leistungsstarker und gezielter Anwendung, dabei besonders anwenderfreundlich
Anwendung im Incidin® Dry Wipes System	Schnelle Anwendung am „Point of Care“ mit einer Standzeit von 28 Tagen und hochwertigen Tüchern in Premium-Qualität.

WIRKSAMKEIT	KONZENTRATION	EINWIRKZEIT
<b>Flächendesinfektion gem. VAH-Verfahren 2015 (einschl. EN 16615), hohe Belastung</b>		
Bakterizid, levurozid	konzentriert	5 Min.
<b>Prüfung nach DVV / RKI-Leitlinie</b>		
Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV) gemäß RKI-Empfehlung 1/2004*	konzentriert	0,5 Min.
Rotavirus*	konzentriert	5 Min.
Papovavirus / Polyomavirus / SV40*	konzentriert	15 Min.
<b>EURO-Normen 4-Felder-Test (geringe und hohe Belastung)</b>		
EN 13727 (bakterizid)	konzentriert	30 Sek.
EN 13624 (levurozid)	konzentriert	30 Sek.
EN 14348 (tuberkulozid)	konzentriert	3 Min.
EN 16615 (bakterizid, levurozid)	konzentriert	5 Min.

\* DVV 2015 (Susp. Test)

## GEBRAUCHSANWEISUNG

			<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Auf die Oberfläche sprühen</li> <li>2 Mit einem Tuch über die Oberfläche wischen und sicherstellen, dass diese ausreichend benetzt ist</li> <li>3 Trocknen lassen</li> </ol>
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Auf einen sauberes Tuch sprühen</li> <li>2 Über die Oberfläche wischen und sicherstellen, dass diese ausreichend benetzt ist</li> <li>3 Trocknen lassen</li> </ol>
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Auf die Oberfläche sprühen und sicherstellen, dass diese ausreichend benetzt ist</li> <li>2 Trocknen lassen</li> </ol>
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tuch aus dem Tuchspender entnehmen</li> <li>2 Über die Oberfläche wischen und sicherstellen, dass diese ausreichend benetzt ist</li> <li>3 Trocknen lassen</li> </ol>

**EUROPEAN HEADQUARTERS:**  
**ECOLAB EUROPE GMBH**  
 Richtstrasse 7  
 8304 Wallisellen  
 Switserland  
 +41(0) 44-877-2001  
 www.ecolab.eu



**ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH**  
 Ecolab-Allee 1  
 40789 Monheim am Rhein  
 +49(0) 2173-599-1900  
 www.ecolabhealthcare.de



STARK.  
 SCHNELL.  
 EINFACH.



Oberflächendesinfektion für Medizinprodukte



Schnelldesinfektion für alkoholbeständige Flächen aller Art.  
 ⓓ BIOZID N-12164

## GEBRAUCHSANWEISUNG

Gebrauchsfertige Lösung zum Sprühen und Einschäumen, sowie zur Verwendung im Tuchspender (Incidin® Dry Wipes System). Produkt auf trockenen Zellstoff geben, die Oberfläche abwischen und antrocknen lassen oder Oberfläche aus ca. 30 cm Entfernung einsprühen (ca. 40 ml / m<sup>2</sup>) und antrocknen lassen. Getränktes Tuch aus Tuchspender (Incidin® Dry Wipes System) entnehmen und die Oberfläche abwischen. Dabei auf gleichmäßige Benetzung achten. Soweit elektrische Geräte betrieben werden, ist auf Explosionsschutz oder spannungsfreien Zustand der Geräte zu achten. Laut UVV sind Schutzhandschuhe zu tragen.

## ZUSAMMENSETZUNG

In 100 g sind als Wirkstoffe enthalten:  
 20 g 2-Propanol, 10 g Ethanol,  
 0,2 g Benzalkoniumchlorid,  
 0,01 g Glucoprotamin®

## GUTACHTEN

Umfangreich geprüft - mikrobiologisch, virologisch, toxikologisch und ökologisch.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere aktuellen Gutachten zur Verfügung.

## BESTELLINFORMATIONEN

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Incidin® Foam Flasche	16 x 750 ml	30 460 10 PZN 045 242 66
Incidin® Foam Kanister	2 x 5 L	30 134 20 PZN 009 852 37
Incidin® Wipes Dispenser N Tuchspender	1 Stück im Karton	100 33 125 PZN 109 46 586
Incidin® Premium Wipes HygPack Deckel rot	6 Stück / Karton	100 32 690 PZN 109 46 511

## LAGERUNG

Produkt in der Originalverpackung nicht über 25 °C lagern. Kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

### Haltbarkeit nach dem Öffnen:

Bis zum aufgedrucktem Verfalldatum

BIOZID- UND MEDIZINPRODUKTE VORSICHTIG VERWENDEN. VOR GEBRAUCH STETS ETIKETT UND PRODUKTINFORMATIONEN LESEN. NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.

