

Hersteller:

Kleinmann GmbH
Am Trieb 13
72820 Sonnenbühl

Allgemein

IDEAL Antisept Desinfektionsflüssigkeit ist ein gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel für kleine Flächen und Inventar in Arztpraxen, Heimen und Kliniken (z.B. Behandlungsstühle, Hand- und Winkelstücke), Ohrpassstücke, Hörgeräte und medizinische Geräte zur Ohrabformung. *IDEAL Antisept* Desinfektionsflüssigkeit ist wirksam gegen Bakterien, Viren und Pilze mit einer Einwirkzeit von einer Minute.

Anwendung

- Desinfektionstücher:

Die zu desinfizierende Oberflächen gründlich mit einem Desinfektionstuch abreiben. Hörgerät, Ohrpassstück und/oder medizinisches Instrument zur Ohrabformung nach einer Einwirkzeit von einer Minute mit einem saugfähigen Tuch trocken reiben.

Ein Tuch reicht für eine Fläche von ungefähr 30 x 30cm.



Anwendung: Deckel der Spenderdose abnehmen, Beutel nach oben aufschneiden (Tücher im Beutel lassen). Das erste Tuch aus der Mitte der Rolle durch die Spenderöffnung ziehen, anschließend Deckel aufsetzen. Zur leichten Einzelentnahme Tuch schräg nach vorne abreißen. Nach Gebrauch Deckel schließen.

- Desinfektionsflüssigkeit:

Flüssigkeit auf ein Einwegtuch gießen oder sprühen und die Flächen vollständig benetzen. Die Flächen dürfen anschließend während der Einwirkzeit nicht trockengerieben werden. Hörgerät, Ohrpassstück und/oder medizinisches Instrument zur Ohrabformung nach einer Einwirkzeit von einer Minute mit einem saugfähigen Tuch trocken reiben.

Zulassung als Medizinprodukt der Klasse IIb (CE 0483).


Registriert als Biozid-Produkt.

Das Produkt ist DGHM/VAH gelistet.

Anwendung Spendereimer:


1. Handschuhe anziehen zum Schutz der Vliesrolle.
2. Vliestuchrolle in den leeren Spendereimer geben.
3. Pro Rolle Premium Vliesstoff :1,5 Liter
Pro Rolle Standard Vliesstoff: 0,8 Liter
gebrauchsfertige Lösung von der Mitte nach außen über die Vliesrolle hinzugeben.
4. Nach 45 bis 60 Minuten Einwirkzeit sind die Tücher gebrauchsfertig.
5. Dokumentation und Beschriftung des beigefügten Etiketts nach RKI-Angaben.
6. Erstes Tuch von Rollenmitte durch die Spenderöffnung ziehen u. Deckel verschrauben.
8. Zur leichten Einzelentnahme Tuch schräg nach vorn abreißen.
9. Nach Gebrauch Deckel sorgfältig schließen. Bei Raumtemperatur lagern.
11. Bitte Standzeit (28 Tage), Einwirkzeit und Aufbereitungsangaben beachten.

Aufbereitung Spendereimer / Gebinde:

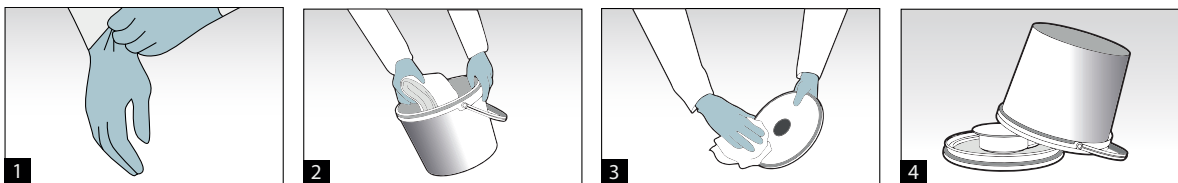

1. Handschuhe sowie ggf. Schutzbrille tragen.
2. Zur **Reinigung** des Spendersystems restlichen Inhalt entsorgen und alle Oberflächen vollständig mit heißem Wasser (55-60 °C) ausspülen.
3. Zur **Desinfektion** alle Oberflächen (Spender, Deckel, Öffnung) mit einem in alkoholischer Desinfektionsmittellösung getränktem Vliestuch auswischen. Einwirkzeit beachten.
4. Abschließend alle Teile vor der Wiederverwendung vollständig trocknen lassen.

Anwendung Nachfüllpacks

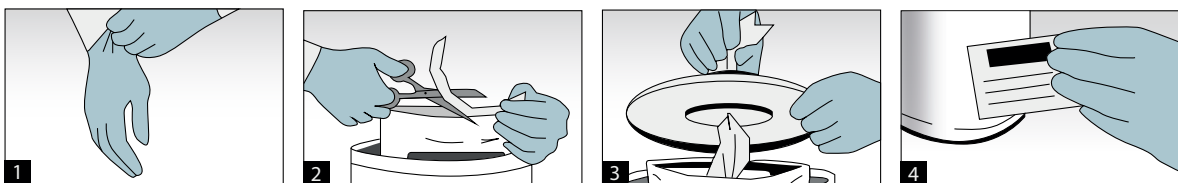

1. Handschuhe anziehen.
2. Nachfüllpack in leeren, aufbereiteten Behälter geben und Packung öffnen.
3. Erstes Tuch durch Deckelöffnung führen und Deckel schließen.
4. Etikett von Nachfüllpackung auf Dose kleben.